


SET DE CUATRO CORREAS SUJECCION PACIENTE CAMILLA RESCATE TITAN

Ref. 04-0108-TR4



2. Trekk litt i den frie enden av båndet for å sette trebjelkespennen fast på toppen av tobjelkespennen (fig. 3).

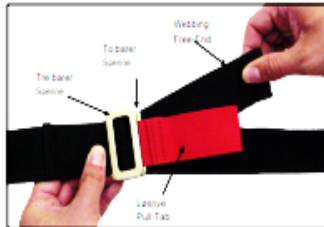

Figur 3. Sitte spenne

3. Stram fastholdenheten ved å trekke i den frie enden av båndet.

!!! ADVARSEL !!!

En uhemmet eller utilbørlig pasient kan lide skader. Fest alltid pasienten i redningslampan med et fastholdelsesanlegg som er egnet for redningsaksjonen.

4.3 Løsne beltene

For å løsne en fastholdelse, trekk utbruddstappen mot spennen (fig. 4). Fortsett å trekke til båndet er så løst som ønsket.



Figur 4. Løsne tilbakeholdenhet

For å løsne fastholdelsesanordningen, løsner du først som i trinn nummer 1, vinkler deretter trebjelkespennen og fører den nedover gjennom åpningen i tobjelkespennen (fig. 5).



Figur 5. Løsne spennen

4.4 Feste belta

!!! ADVARSEL !!!

Feil bruk kan forårsake personskade. Bruk redningsbåren bare som beskrevet i denne håndboken.

!!! ADVARSEL !!!

En pasient uten tilsyn kan bli skadet. Hold deg sammen med pasienten.

Velg festepunkter som er passende for effektiv sikring av pasienten, samt for å jobbe sammen med ditt eget festesystem.


Fest de medfølgende begrensningene som følger:

1. Løsne spennen for å skille fastholdelsesstroppene.
2. Begynn utenfor redningsbåren, og før den løkkede enden av stroppen innover mellom redningsbåreskinnen og nettet på et valgt festepunkt. (Fig. 7)



Figur 7. Passing Looped End Through Cove

3. Tre spennen gjennom fastholdessløyfen (fig. 8) og trekk til sløyfen er tett rundt redningskinnen.

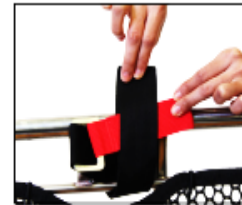

Figur 8. gjengespenne

4. Fest den gjenværende stroppen til motsatt side av redningsbåren ved å følge trinn 2 og 3.

5. Bruke redningsbåre

5.1 Før du tar redningsbåren i bruk

Personell som bruker denne redningsbåren må lese denne håndboken. Hvis du bruker de

- medfølgende begrensningene, må du feste dem som beskrevet i Feste begrensningene.
- Bekreft at redningsbåren, begrensningene og nettverket er i orden tilstand. Følg